



Перед применением продукта просим Вас внимательно прочитать данное руководство по эксплуатации. Соблюдайте все приведенные в нем предписания, в частности, указания по безопасности.

Общие положения

- Перед использованием матраса снимите с него упаковку.
- Положите **Матрас Invacare® Softform®** непосредственно на основание кровати.
- Для упрощения транспортировки и экономии места при хранении матрасы поставляются в скатанном виде. Это никак не отражается на сроке службы или функциях матрасов. Однако мы рекомендуем распаковать матрас в течение 3 недель после получения. Разложив матрас впервые, оставьте его лежать не менее одного часа (в зависимости от температуры в помещении), чтобы он смог полностью расправиться.
- Особенно прочный, непромокаемый чехол с дышащей биэластичной поверхностью повышает комфорт пациента и оптимизирует действие вспененного наполнителя.
- Между пациентом и матрасом не должно, по возможности, находиться ничего, кроме простыни. Дополнительные прокладки или чехлы могут снизить эффективность действия матраса.
- Вспененный наполнитель матраса необходимо регулярно осматривать. При повреждении чехла замените его. Не следует применять матрас с поврежденным чехлом.
- Надевая на матрас новый чехол, следите за тем, чтобы углы матраса располагались по углам чехла.

Описание продукта

Матрасы Invacare® Softform® обеспечивают крайне эффективное снижение давления на туловище, соответствующее индивидуальным потребностям пациента. Равномерное распределение давления снижает давление на особенно чувствительные участки тела. **Матрасы Invacare® Softform® Premier, Premier Visco и Premier Glide** разработаны для профилактики и лечения пролежней до II степени тяжести согласно классификации Европейской консультативной группы по пролежням (EPUAP). Матрасы Invacare® **Softform®** предназначены для применения на специальных кроватях. Соблюдайте соответствующие предписания норм DIN EN 1970:2000 и DIN EN 60601-2-38.



Согласно DIN EN 1970 расстояние между поверхностью матраса и верхним краем боковой решетки должно составлять не менее 22 см!



При использовании кроватей с регулируемым основанием следите за тем, чтобы острые края основания не защемляли и не повреждали матрас.

Переворачивание пациента

Пациент должен регулярно менять свое положение в постели самостоятельно или с посторонней помощью. Это ведет к снижению давления на туловище и препятствует образованию пролежней.

Чистка, дезинфекция и подготовка матраса к повторному применению

- В ходе применения матрас следует еженедельно чистить влажной салфеткой. Чехол можно протирать нейтральным чистящим средством (бытовое мягкое чистящее и дезинфицирующее средство) и горячей водой или стирать в стиральной машине при 71°C.
- При сильном загрязнении мы рекомендуем выстирать чехол с разбавленным чистящим раствором в стиральной машине при 71°C. Не применяйте чистящие средства, содержащие фенол или спирт.
- При наличии инфекции обратитесь к уполномоченному по вопросам гигиены. Чехол можно протирать одноразовой салфеткой, смоченной в 0,1-процентном растворе хлора. Затем чехол необходимо промыть чистой водой.
- Чехол можно сушить в сушилке для белья при 105°C.
- Чистку и дезинфекцию матраса рекомендуется проводить горячим паром.

Указания по повторному применению матраса

- При смене пациента матрас необходимо продезинфицировать с применением проверенного метода дезинфекции, утвержденного Институтом им. Роберта Коха.
- Результаты обработки матраса следует занести в протокол о чистке и дезинфекции инвентаря, являющийся составной частью системы обеспечения гигиены.

Замена чехла

Откройте застежку-молнию и осторожно стяните чехол с вспененного наполнителя матраса. Надевая новый чехол, следите за тем, чтобы углы матраса располагались по углам чехла. После этого закройте застежку-молнию.

Качество и воспламеняемость

- Все продукты Invacare® снабжены CE-маркировкой согласно Директиве по медицинским продуктам.
- Вспененный наполнитель, из которого изготовлены Матрасы Invacare® Softform®, прошел независимые испытания согласно норме BS 5852:1990 с применением источников огня 0, 1 и 5 и получил соответствующий сертификат. Чехол прошел испытания согласно нормам BS 7175:1989 и DIN EN 597 1,2.

Показания / противопоказания

Профилактика и лечение пролежней до II степени тяжести согласно классификации EPUAP.	Не известны.
--	--------------

Технические характеристики

Наименование продукта	Invacare® Softform® Premier	Invacare® Softform® Premier Visco	Invacare® Softform® Premier Glide
Код продукта	1486874	1486870	1494516
Размеры			
Общая ширина, см	90	90	90
Общая длина, см	200	200	200
Общая высота, см	15	15	15
Вес (чехол и матрас), кг	13	13	13
Материал матраса	ПУ	ПУ	ПУ
Материал чехла (чехол входит в объем поставки)	ПУ / ПА	ПУ / ПА	ПУ / ПА
Допустимая нагрузка			
Мин. вес, кг	25	25	25
Макс. вес, кг	247	247	247



Для матрасов **Softform®** дополнительно предлагается бактерицидный **Чехол Softform® Silver3™**.

Softform® - это зарегистрированная торговая марка компании **INVACARE UK Ltd**. Мы оставляем за собой право внесения изменений, служащих улучшению технических характеристик продукта, и не несем ответственности за возможные ошибки в содержании руководства по эксплуатации.

Изготовитель:

Invacare Operations UK Ltd
Unit 4
Pencoed Technology Center
Bridgend
CF35 5HZ
United Kingdom