


# EYELOOP

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РУССКИЙ

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- EyeLoop с пультом дистанционного управления
- Батарейки (3 x 1,5В AA)

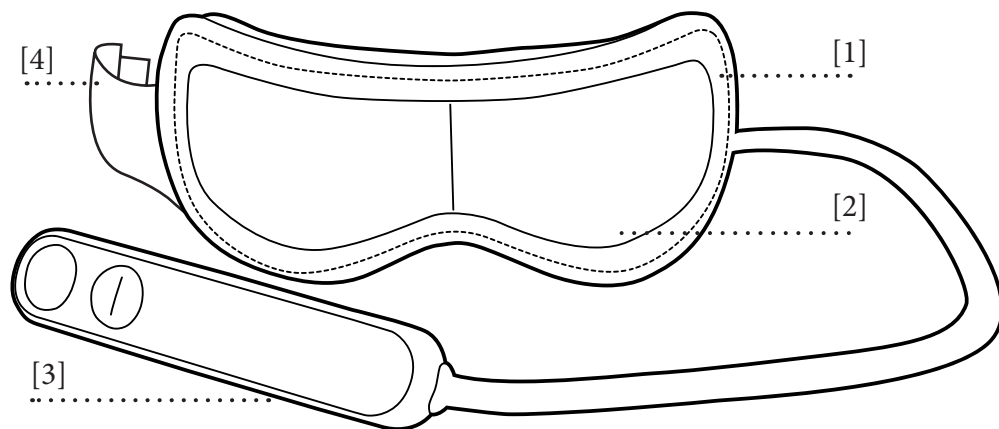

- [1] Массажер для глаз EyeLoop
- [2] Гибкое защитное покрытие
- [3] Пульт дистанционного управления
- [4] Регулируемая стягивающая лента

### НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Присоедините адаптер к EyeLoop и к источнику электропитания. Для мобильного использования: снимите крышку пульта дистанционного управления и вставьте батарейки. Снова закройте крышку.

**Рекомендации:** Убедительная просьба использовать либо адаптер либо батарейки. Не используйте их одновременно.

### ОБОРУДОВАНИЕ / ФУНКЦИИ

На лице и на висках у нас имеется множество точек, каждая из которых, соответственно, связана с определенной частью тела, органом или мышцами. С помощью продвинутой техники управления давлением воздуха EyeLoop имитирует расслабляющий надавливающий массаж пальцами, руками и ладонями в соответствующих местах.

Его эргономичный дизайн подойдет к любой форме лица и в любой момент подарит расслабляющий массаж глаз и висков. Мягкая вибрация стимулирует кровообращение, снимает напряжение и усталость глаз, уменьшает головную боль и обеспечивает глубокий сон.

### ОБОРУДОВАНИЕ / ФУНКЦИИ



ДАВЛЕНИЕ ПРОГРЕВ

#### ВОЗДУШНОЕ ДАВЛЕНИЕ


В стандартном режиме воздушное давление умеренное, а функция прогрева запрограммирована на низкую температуру. Массаж в данном режиме способствует мягкому расслаблению глаз при ежедневных нагрузках. Для более интенсивного массажа предусмотрен трехступенчатый режим. Изменение режима осуществляется нажатием кнопки таким образом, чтобы давление на массируемые места можно было медленно усиливать. Такой массаж облегчает проявления усталости, расслабляет, успокаивает нервы и улучшает общее самочувствие.

#### ПРОГРЕВ

Функция прогрева стимулирует обмен веществ и дарит приятное чувство во время массажа.

Благодаря регулируемой стягивающей ленте EyeLoop превосходно подходит к любой форме головы. Простой в обращении пульт дистанционного управления обеспечивает удобное изменение программы без необходимости снятия массажных очков.

### ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

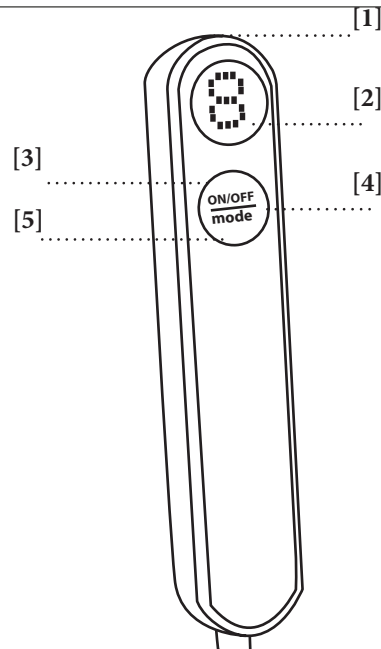

- [1] Подключение электропитания (для адаптера)
- [2] Показание дисплея для режима давления воздуха и прогрева
- [3] Вкл. / выкл.

Нажатием данной кнопки (при ее удерживании) EyeLoop начинает функционировать. По умолчанию заданы стандартное время работы в 15 минут, режим давления воздуха (Relaxing) и функция прогрева на низкой температуре (h). С помощью данной кнопки при включенном массажере можно отрегулировать подогрев (смотрите [4]). Чтобы выключить EyeLoop нажмите на данную кнопку и удерживайте ее.

#### [4] Вкл. / выкл., функция прогрева

С помощью данной кнопки помимо прочего регулируется функция прогрева следующим образом:

- одно нажатие: h = низкая температура
- повторное нажатие: H = повышенная температура.
- при еще одном нажатии данной кнопки снова отражается режим давления воздуха, выбранный ранее.

#### [5] Давление воздуха

С помощью данной кнопки Вы можете выбрать различные режимы давления воздуха. Выберите три различных режима с разными интервалами:

- 1: расслабляющий
- 2: массирующий
- 3: комфортный

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации массажера внимательно прочтите следующие правила, чтобы достичь безупречного функционирования прибора и его оптимального воздействия. Просьба сохранять Правила в течение всего времени эксплуатации.

- Массажер соответствует общепринятым техническим принципам и современным требованиям к безопасности.
- Аппарат не требует специального обслуживания. В случае возможных неполадок ремонт может производиться только уполномоченными специалистами. Нецелевое применение аппарата и неавторизованный ремонт запрещены из соображений безопасности и приведут к утрате гарантий.
- Никогда не трогайте вилку мокрыми руками.
- Избегайте попадания на аппарат воды, не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.
- Если аппарат длительное время не используется, отсоедините кабель питания от розетки, чтобы избежать короткого замыкания.
- Не используйте аппарат с поврежденной вилкой, шнуром или разболтанными местами крепления. Если вилка или шнур повреждены, их следует заменить у производителя, в сервисном центре или с привлечением квалифицированного персонала.
- При нарушениях в работе немедленно отключите аппарат от электропитания. Использование не по назначению или неправильное использование исключают всякую ответственность производителя за причиненный ущерб.
- Чтобы не превышать уровень воздействия на мышечную и нервную системы, не нарушайте рекомендованное время массажа в 30 минут.
- Любой массаж, даже мануальный противопоказан в случае беременности или, если области массажа (одна или несколько) подвержены любому из перечисленных заболеваний: недавние травмы, тромбозы, воспаления и опухоли любого происхождения, а также рак.

- Для использования аппарата в лечебных целях рекомендуется консультация с врачом.
- Никогда не используйте острые предметы во время пользования массажером.
- Перед использованием массажера рекомендуется снять контактные линзы, а также заколки и украшения для волос.
- Включайте массажер лишь после того, как Вы одели его на голову.
- Не используйте массажер, управляя автомобилем.
- Если Вы используете электронные приборы, например, сердечный стимулятор, на каждый раз перед массажем Вам необходимо проконсультироваться с врачом.

### ХРАНЕНИЕ / УХОД

С помощью регулярного ухода Вы продлите срок службы Вашего EyeLoop и одновременно обеспечите его надежную работу.

1. Рекомендуется хранить в сухом защищенном от пыли месте.
2. Хранить EyeLoop вдали от жидкостей или открытого огня.
3. Протирать массажер сухой мягкой салфеткой.
4. Если Вы не используете EyeLoop, отсоедините его от электросети.

### ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Устранение
Аппарат подключен к сети питания, но ни сам прибор, ни пульт управления не работают.	<p>Проверьте присоединение к адаптеру.</p> <p>Проверьте, правильно ли вставлены батарейки.</p> <p>При очень долгом использовании аппарат может перегреться. Выключите его и дайте охладиться в течение 30-50 минут.</p> <p>Поменяйте батарейки.</p>
Давление воздуха и вибрация слишком «слабые».	<p>Поменяйте батарейки.</p>

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 22 x 10 x 8,6 см  
 Размеры пульта ДУ: 18,4 x 3,6 x 3,9 см  
 Масса: 390 г  
 Номинальная мощность: 4,5 Вт  
 Батарейки: 3 x 1,5 В AA  
 Адаптер: DC 4,5, 1A  
 Сертификаты:



#### Генеральный импортер в России:

ООО «Альфа БС»  
 109518, Москва,  
 ул. Грайвороновская, д.4 стр.1  
 тел: (495) 229-45-32  
 факс: (495) 229-45-33

Эл. адрес: info@casada.ru  
 Адрес в интернете: www.casada.ru

Авторское право на изображение и тексты принадлежит «Casada International GmbH», они не могут быть использованы иначе, нежели с явного согласия владельца.

Авторское право © 2012 г.  
 Casada International GmbH  
 Все права защищены.

