

**Інструкція з
користування
завушним ВТЕ
слуховим апаратом**



Належне використання

Універсальні заушні слухові апарати повітряної провідності призначені для компенсацій втрат слуху. Основний принцип роботи слухових апаратів, це сприйняття, підсилення і передача звуку на барабанну перетинку.


Модель:

ЗМІСТ


Опис слухового апарата.....	- 1 -
Увімкнути/Вимкнути слуховий апарат..	- 4 -
Заміна батарейки.....	- 5 -
Ковпачок і тонкий звуковід.....	- 8 -
Експлуатація слухового апарата.....	- 15 -
Регулятор гучності.....	- 15 -
Кнопка перемикання програм....	- 16 -
Тример для налаштування.....	- 17 -
Перемикач функцій.....	- 18 -

Опис слухового апарата

(Відкрите слухопротезування)

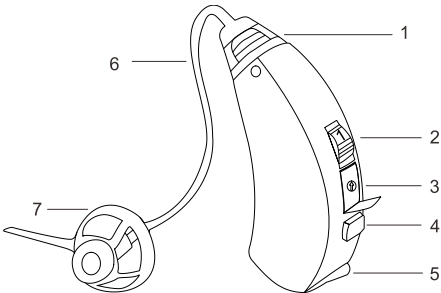

(Стандартний ріжок)

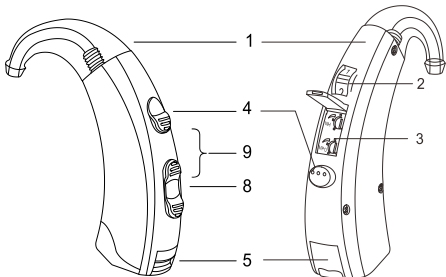


1. Мікрофон
2. Регулятор гучності
3. Кришка тримера і Н/МРО тример
4. Кнопка перемикання програм
5. Батарейний відсік
6. Тонкий звуковід
7. Ковпачок
8. Перемикач функцій
9. Світлодіодна індикація

Увімкнути/Вимкнути слуховий апарат


1. Коли двері батарейного відсіку закрити, слуховий апарат почне працювати, і програма за замовчуванням буде активована.

2. Щоб вимкнути слуховий апарат, частково відкрийте батарейний відсік. Порада: Якщо Ви не користуєтесь слуховим апаратом, не забудьте вимкнути його, щоб уникнути непотрібного розряду батарейки.

Увімкнути

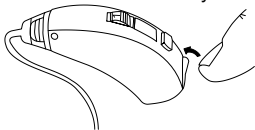


Вимкнути

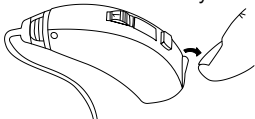

Заміна батарейки

1. Відкрийте повністю кришку батарейного відсіку.
2. Видаліть використану батарейку, якщо присутня. Вставте нову батарейку так, щоб позначка "+" на ній була повернута в той же бік, що і позначка "+" на батарейному відсіку.
3. Обережно закрийте кришку батарейного відсіку.

Порада: Якщо Ви не користуєтесь слуховим апаратом, дістаньте батарейку, щоб запобігти корозії батарейного відсіку, і гарантувати більш тривале використання батарейки.

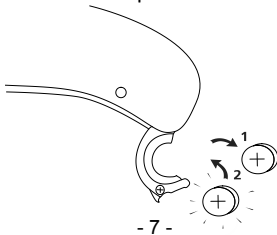


Ковпачок і тонкий звуковід

Одягніть ковпачок на тонкий звуковід.

Переконайтеся, що новий ковпачок правильно і надійно встановлений.

З'єднайте тонкий звуковід з апаратом.

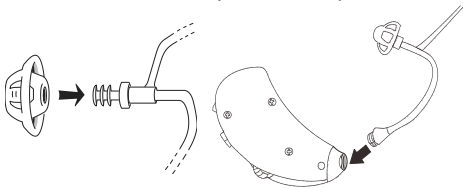

Розміщення/Видалення слухового апарата

Розміщення (відкрите слухопротезування)

1. Тримайте за тонкий звуковід (де він згинається) і плавно вставте ковпачок, щоб він повністю увійшов в зовнішній слуховий прохід.
2. Важливо, щоб тонкий звуковід і ковпачок були розміщені правильно.

3. Коли ковпачок встановлений правильно, тонкий звуковід не повинен стирчати з вуха.

Видалення (відкрите слухопротезування)

1. Тримайте тонкий звуковід великим і вказівним пальцями і потягніть назовні.
2. Зверніться до слухопротезиста, якщо у вас є труднощі видалення слухового апарата.

Розміщення (стандартний ріжок)

1. Тримайте вушну вкладку між вказівним та великим пальцем і вставте в зовнішній слуховий прохід.
2. Вставте вушну вкладку повністю в слуховий прохід. В разі необхідності трішки проверніть вкладку.



3. Акуратно поверніть верхню частину вушної вкладки вперед і назад так, щоб вона зайняла своє місце.

4. Перевірте чи правильно вставили вушну вкладку. Відкрийте та закрийте рот, щоб дізнатися чи не має дискомфорту.

5. Переконайтесь, що слуховий апарат знаходиться за вухом.

Видалення (стандартний ріжок)

1. Тримайте за трубочку вушної вкладки.
2. Витягніть вушну вкладку назовні.
3. Зверніться до слухопротезиста, якщо у Вас є труднощі з видалення слухового апарата.

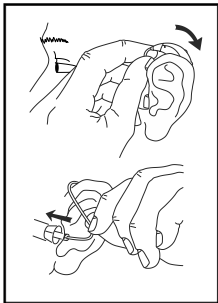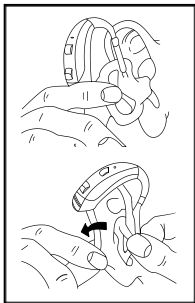

Експлуатація слухового апарата


Регулятор гучності

Регулятор гучності (колесо) має номери від

1 до 4, максимальне значення гучності 4.

Для збільшення гучності покрутіть колесо

вгору. Для зменшення гучності потрібно

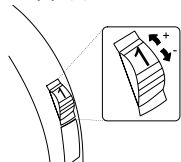

покрутити колесо


вниз.

Кнопка перемикання програм

Ви можете перемикати програми, натискаючи на кнопку один раз. Ви будете чути один або декілька звукових сигналів. Кількість сигналів показує, яку програму Ви обрали. Коли слуховий апарат вимкнути, а потім увімкнути, то він завжди повертається до програми за замовчуванням (перша програма).

Триммер для налаштування

Щоб зменшити рівень шуму, поверніть триммер за годинниковою стрілкою.

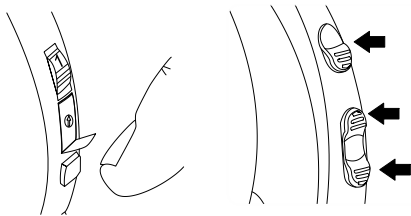

Перемикач функцій

Функція регулювання гучності: Для збільшення гучності натисніть, а потім відпустіть верхню частину перемикача. Для зменшення гучності, натисніть, а потім відпустіть нижню частину перемикача.

Телефонна котушка (опція): Щоб перейти до телефонної котушки, утримуйте перемикач декілька секунд, поки не

почуєте "звуковий сигнал". Для повернення до звичайного режиму роботи утримуйте перемикач декілька секунд.

MPO(опція): Утримуйте перемикач до 3 секунд, поки світлодіод не спалахне двічі.

Коректуйте MPO перемикачем функцій.

Якщо протягом 10 секунд не буде жодних дій, апарат повернеться до звичайного режиму роботи.

Н ф ():

і

ся

й

і

і

тисні

на