



UA.TR.116

B.Well 
Caring for everyone

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ

Назва медичного виробу:

WT-03 base Термометр цифровий, ручко-подібний, 60 сек, вологонепроникний

WT-04 standard Термометр цифровий, гнучкий наконечник, 60 сек, вологонепроникний


WT-06 flex Термометр цифровий, качка, дитячий дизайн, гнучкий наконечник, 10 сек., вологонепроникний

WT-06 flex Термометр цифровий, кролик, дитячий дизайн, гнучкий наконечник, 10 сек., вологонепроникний

Дякуємо Вам за придбання електронного медичного термометра компанії B.Well.

Термометр електронний – медичний виріб, призначений для індивідуального використання, у медичних закладах та у пунктах невідкладної медицини. Призначений для вимірювання тіла аксиллярним, оральним або ректальним методом.

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ПРИЛАДУ.

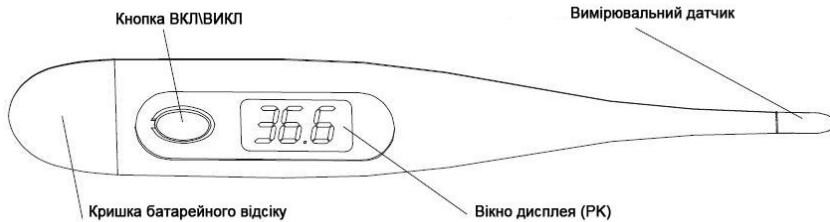

ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЛАДУ:

Перед початком вимірювання увімкніть термометр за допомогою кнопки. Прозвучить звуковий сигнал і кілька секунд на екрані будуть відображені всі позначки одночасно, триватиме перевірка приладу. Коли на екрані з'явиться знак °C, це означає, що прилад готовий до роботи.

Для аксиллярного вимірювання протріть пахову впадину сухим рушником, помір розмістіть датчик термометра.

⚠ Увага, надмірна пітливість може вплинути на результати вимірювання.

При оральному методі вимірювання помістіть датчик під язик, якомога ближче до дна. Тримайте рот закритим під час вимірювання.

Для ректального вимірювання змажте датчик спеціальним змащувачем, вставте датчик в пряму кишку на 1см.

Вимірювання зазвичай триває 1-3 хвилини.

⚠ Зверніть увагу, що звуковий сигнал не означає, що вимірювання закінчено, він означає що зміна температури триває повільніше. Рекомендовано тримати термометр ще 3-60 секунд після звукового сигналу.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

Дітям можна використовувати тільки під наглядом дорослих.

Не ходіть, не розмовляйте під час вимірювання температури.

Очищуйте та дезінфікуйте прилад після кожного вимірювання.

Зберігайте прилад у футлярі в захищеному від дітей місці.

Не кидайте прилад та не завдавайте йому ударів.

Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад.

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ.

Після кожного вимірювання протирайте корпус приладу сухою губкою. Датчик протирайте після кожного вимірювання 70% спиртовим розчином.

Не кидайте прилад та не піддавайте дії екстремальних температур. Заборонено занурювати прилад у рідину для очищення.

⚠ Увага. Термометр повинен використовуватись тільки під наглядом дорослих. Слідкуйте за тим, щоб датчик знаходився у чистому вигляді.

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Не виявлено.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Діапазон вимірюваної температури: 32-43 °C

Похибка вимірювання: +/- 0,1 °C

Час вимірювання: 1-3 хвилини.

Автоматичне відключення: не більше ніж через 10 хвилин

Розміри: 129x19x11 мм

Вага: 10 грам

Комплектація: термометр медичний – 1 шт., інструкція з використання – 1 шт., захисний футляр – 1 шт., гарантійний талон -1 шт., елемент живлення -1 шт.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Рекомендовано зберігати при температурі -20 .. +50 °C та вологості повітря не більше 95%.

 **УТИЛІЗАЦІЯ.** Не рекомендовано утилізувати з побутовим сміттям.


ГАРАНТІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Виробник забезпечує **гарантійні зобов'язання протягом 24 місяців** з дати придбання приладу.










При виявленні виробничого дефекту протягом гарантійного терміну несправний прилад буде відремонтовано, а в разі неможливості ремонту замінений безкоштовно.

Гарантійне й безкоштовне сервісне обслуговування не надається при наявності на корпусі приладу слідів механічного впливу, вм'ятин, тріщин, сколів тощо, слідів розтину корпусу, слідів спроб ремонту поза авторизованого центру технічного обслуговування, слідів попадання вологи всередину корпусу або впливу агресивних засобів, а також в інших випадках порушення споживачем правил зберігання, транспортування і технічної експлуатації приладу, що передбачені правилами, викладеними в інструкції з експлуатації.

Гарантія не поширюється на комплектуючі, схильні до зносу, а також на елементи живлення, сумочку і упаковку приладу.

 Гарантійні зобов'язання дійсні тільки за умови повністю заповненого гарантійного талона й наявності печатки торгового підприємства або печатки центру технічного обслуговування. Продавець зобов'язаний видати гарантійний талон.

Спеціальні символи.

	Ознайомтесь з інструкцією із використання.
	Серійний номер виробу.
	Номер партії.
	Артикул.
	Виробник.
	Обмеження мінімальної та максимальної температури.
	CE маркування
	Берегти від вологи.
	Не утилізувати з побутовим сміттям.



V.WELL SWISS AG
Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Ваше Здоров'я Трейдинг», 03179, м.Київ, вул.Чорнобильська, 19-102, тел. (044) 221-68-20, www.vztrading.com.ua

Дата останнього перегляду: Серпень 2018.